

A photograph of a surgical team in an operating room. Three surgeons in blue scrubs, masks, and hairnets are performing a procedure. The scene is brightly lit by overhead surgical lamps. A red surgical drape is visible in the foreground.

NOUVAG⁺

+ SOLUTIONS: MANUFACTURED IN SWITZERLAND +

Gynäkologische Morcellation

nouvag.com

TCM 3000 BL Morcellator: Das robuste und intuitive System mit fein abgestimmter Pedalsteuerung für anspruchsvolle Chirurgen

Das kompakte Steuergerät TCM 3000 BL Morcellator bietet Ihnen eine präzise und effiziente Gewebemorcellation. Mit seinem intuitiven Bedienfeld haben Sie die volle Kontrolle über die stufenlose Regulierung der Drehzahl Ihrer Instrumente. Der Morcellator ermöglicht Drehzahlen von bis zu 1'000 U/min, um eine exakte Schnittleistung zu gewährleisten. Sie haben die Wahl zwischen frei einstellbaren Geschwindigkeiten im VARIO-Modus oder der Nutzung von drei vordefinierten Programmen mit spezifischen Geschwindigkeitsbereichen.

HIGHLIGHTS

- + Präzise Schnittleistung für optimale Ergebnisse
- + Vordefinierte Programmtasten
für schnellen Zugriff auf
unterschiedliche Geschwindigkeiten
- + Robuste und hochwertige Technik für lange Zuverlässigkeit
- + Intuitive Bedienung mit fein abgestimmter Pedalsteuerung





Zubehör & Sets für Laparoskopische Hysterektomie

Um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Verfahren gerecht zu werden, bieten wir eine breite Modellpalette an Morcellatoren mit verschiedenen Durchmessern. Unsere Instrumente sind in den Größen 12 mm und 15 mm erhältlich, um eine passgenaue Lösung für jede individuelle Anwendung zu gewährleisten. Durch die präzise Auswahl und Abstimmung der Instrumente und Zubehörteile erzielen wir hervorragende Ergebnisse bei der Morcellation und sorgen für maximale Sicherheit während des operativen Eingriffs. Vertrauen Sie auf unsere bewährten Produkte, um Ihre chirurgischen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

	Set REF
Basis-Set bestehend aus	3287nou
TCM 3000 BL Morcellator Steuergerät (REF 3281)	
Pedal (REF 1507nou), Elektronikmotor 21 (REF 2090nou)	
Sprayrohr Aufsatz (REF 19584)	
+ Ø 12mm-Set bestehend aus	4144nou
Getriebeeinheit (REF 5163nou), Handgriff (REF 5183nou)	
Schneidrohr Ø 12 mm (REF 5154nou), Schutzrohr Ø 12 mm (REF 5137nou), Obturator Ø 12 mm (REF 5151nou)	
+ Ø 15mm-Set bestehend aus	4145nou
Getriebeeinheit (REF 5163nou), Handgriff (REF 5183nou)	
Schneidrohr Ø 15 mm (REF 5155nou), Schutzrohr Ø 15 mm (REF 5138nou), Obturator Ø 15 mm (REF 5152nou)	
+ Ø 12mm-Trokar-Set bestehend aus	4147nou
Getriebeeinheit (REF 5163nou), Handgriff (REF 5183nou)	
Schneidrohr Ø 12 mm (REF 5154nou), Trokarhülse Ø 12 mm (REF 5141nou), Obturator Ø 12 mm (REF 5151nou)	
+ Ø 15mm-Trokar-Set bestehend aus	4148nou
Getriebeeinheit (REF 5163nou), Handgriff (REF 5183nou)	
Schneidrohr Ø 15 mm (REF 5155nou), Trokarhülse Ø 15 mm (REF 5142nou), Obturator Ø 15 mm (REF 5152nou)	



[1] ↓

Schneidrohr (Klinge)

Das durch die NOUVAG speziell gefertigte Hightech Schneidrohr erfüllt sämtliche Anforderungen der laparoskopischen Hysterektomie sowie der Myomenukleation. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und Veredelung der Klinge ermöglicht es einen mehrfachen Einsatz und gewährleistet somit eine optimale Leistungsfähigkeit.

[2] ↓

Gewebepositionierer

Die Schutzrohre verfügen über einen integrierten Gewebepositionierer, der das unerwünschte Drehen von Gewebestücken während des Morcellierens verhindert. Er dient auch als Führungselement und gewährleistet so eine präzise und sichere Handhabung des Gewebes.

[1]



REF 5154nou
Schneidrohr
Ø 12 mm



REF 5155nou
Schneidrohr
Ø 15 mm



REF 5151nou
Obturator
Ø 12 mm



REF 5152nou
Obturator
Ø 15 mm



[2]



REF 5137nou
Schutzrohr
Ø 12 mm



REF 5138nou
Schutzrohr
Ø 15 mm



ANTRIEB & DICHTUNGEN



Dichtungshalter



REF 5167nou

Dachdichtung für alle
Schneidrohr Durchmesser.
VPE 10 Stk.



REF 5166nou

Membrandichtung für alle
Instrumenten Durchmesser.
VPE 10 Stk.



Membranschraube



REF 5163nou

Getriebeeinheit mit Dicht-
einheit inkl. Dichtungen.
Die Motorendrehzahl wird
über die Getriebeeinheit mit
passender Untersetzung an
die Klinge übertragen.



REF 5136nou
Dichteinheit



REF 5183nou

Ergonomisch geformter
Handgriff zum Aufstecken auf
die Getriebeeinheit. Wirkt
isolierend gegen die Abwärme
von Getriebe und Motor.



REF 2090nou

Elektronikmotor 21: Bürstenloser
Elektronikmotor mit 2.9 m Kabellänge,
autoklavierbar. Stellt das notwendige
Drehmoment bei gleichmässig
ruhigem Lauf zur Verfügung.



MYOM-ENTFERNUNG

REF 5193

Myom Bohrer

Ø 10 mm, Länge: 330 mm



GREIFZANGEN

REF 5196

Tenaculum Fasszange

Ø 10 mm

Länge: 420 mm



REF 5192

Tenaculum Fasszange

Ø 13.5 / 15 mm, Länge: 420 mm



REF 5194

Tenaculum Fasszange

Ø 5 mm, Länge: 420 mm



REF 5195

Krallenzange, 2 x 3 Zähne

Ø 10 mm, Länge: 420 mm



STERILCONTAINER

REF 4113

Stericase: 465 x 280 x 100 mm,
für die Sterilisation und Lagerung
von sterilisierbaren Instrumenten
und Zubehör.



REF 4126

Silikonmatte: 450 x 270 mm,
Rutschfeste Noppenmatte



Technische Daten

TCM 3000 BL Morcellator	REF 3287nou
Betriebsspannung,	100 V~ / 115 V~ / 230 V~
umschaltbar	50–60 Hz
Leistungsaufnahme	60 VA
Max. Drehmoment Morcellator	100 Ncm*
Motor-Kupplung	INTRA, ISO 3964
Kabellänge Motor	2.9 m
Drehzahlbereich	50 – 1'000 U/min
Schutzklasse	Klasse I
Pedal IP Code	IPX8
Kabellänge Pedal	2.9 m
Abmessungen Steuergerät (B x T x H)	120 x 180 x 110 mm
Gewicht Steuergerät	1.8 kg

* TCM 3000 BL Morcellator erzeugt max. 80 Ncm
(Drehzahlbereich 200–400 U/min).

+ **NOUVAG AG**
St. Gallerstrasse 25
9403 Goldach
Schweiz
T +41 (0) 71 846 66 00
info@nouvag.com

+ **NOUVAG GmbH**
Schulthaißstrasse 15
78462 Konstanz
Deutschland
T +49 (0) 7531 1290-0
F +49 (0) 7531 1290-12
info-de@nouvag.com

NOUVAG⁺